

NOVOBLOC

GEBRAUCHSANWEISUNG

NOVOBLOC ist ein mehrmals verwendbares Einkomponenten-Material zum Ausblocken der Gipsmodelle im zahntechnischen Labor.

NOVOBLOC ist erhältlich in 2 verschiedenen Härtegraden: Farbe Gelb (Y) Shore A 42, Farbe Weiss (W) Shore A 48.

Die außergewöhnlichen Eigenschaften der Masse gestattet ein problemloses Entfernen vom Gipsmodell.

DOSIEREN:

Benötigte Menge mit schnellreissender Bewegung abtrennen oder mit einer Schere abschneiden.

APPLIZIEREN:

Unter sich gehende Stellen am Modell mit NOVOBLOC grosszügig ausfüllen. Überschüssiges Material abreißen oder wegschneiden.

MODELLIEREN:

Nun wird vorzugsweise mit NOVOTRAY (Löffelmaterial) der individuelle Abformlöffel in einer Schichtstärke von min. 2-3 mm aufmodelliert.

ENTFERNEN:

Der ausgehärtete Abformlöffel wird vorsichtig vom Modell entfernt. An Modell und Löffel haftende Ausblockmasse wird mit einer geringen Menge Ausblockmasse in schnellen Bewegungen restlos weggetupft.

Bei klebriger Konsistenz bedingt durch höhere Raumtemperatur wird empfohlen, NOVOBLOC in den Kühlschrank zu legen.

Lagerung: min. -10°C, max. 25°C

Liefereinheit: 140 g

Lagerfähigkeit: 2 Jahre



NOVODENT Ets.

Wirtschaftspark 34

9492 Eschen

Fürstentum Liechtenstein

Tel. : 00423 3771500

Fax : 00423 3771509

Email: info@novodent.com

www.novodent.com