

Zahnaufhellung mit Opalescence – in der Praxis



Eine professionelle Zahnaufhellungsbehandlung ist die minimalinvasivste Behandlung interner Verfärbungen von Zähnen. Sind diese durch innere Einflüsse entstanden, wie z. B. durch Medikamente, Unfall, Erkrankungen etc. sind sie oft nur unter Einsatz geeigneter, hochkonzentrierter Medizinprodukte zu beseitigen.

Mit dieser Behandlung geben Sie Ihren Patienten damit bei maximaler Substanzschonung Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und oft die Fähigkeit, wieder offen zu lachen, zurück.

„Mental health“ ist ebenso wichtig wie „Dental health“!

Die zusätzlich enthaltene PF-Formel im Aufhellungsgel stärkt den Schmelz sogar und schützt zugleich vor Karies!

Opalescence PF stärkt den Zahnschmelz gegen Karies! In einer In-Vitro-Studie wurde untersucht, ob die Behandlung mit Zahnaufhellungsprodukten mit verschiedenen Konzentrationen von Carbamidperoxid bzw. Wasserstoffperoxid die Anfälligkeit des Schmelzes für Karies erhöht. Bereits ein Zahnaufhellungsprodukt mit einem neutralen pH-Wert und 10 % Carbamidperoxid führte nicht zu einem höheren Kariesrisiko. Opalescence PF mit Natriumfluorid und Kaliumnitrat stärkte hingegen sogar den Schmelz und schützte zugleich vor Karies. Alle Opalescence-Produkte enthalten die kariesreduzierende PF-Formel.



Medizinische Zahnaufhellung auf dem Patientenstuhl – Opalescence Boost



Vorher: Frontzahn mit obliteriertem Kanal. Keine Wurzelkanalfüllung existent oder erforderlich.



Nach der Behandlung mit Opalescence Boost, 4 x 20 Minuten. Die Farbe hat sich angeglichen.



Opalescence Boost-Gel wird direkt aus der Spritze aufgetragen und gleichmäßig verteilt.



Opalescence Boost

- Applikationszeit: 2 x 20 Min.
- Auf dem Patientenstuhl
- Kein Licht erforderlich
- 40% H₂O₂

Medizinische Zahnaufhellung, speziell von devitalen Zähnen („Walking-Bleach“-Technik) – Opalescence Endo



Vor der Behandlung: Intense Verfärbung im devitalen Zahn.



Nach 2 Einlagen mit Opalescence Endo.



Devitalen Zahn eröffnen, Wurzelfüllung mit Glasionomer abdecken. Opalescence Endo applizieren, provisorisch verschließen.



Opalescence Endo

- Behandlungszeit: 3-5 Tage
- Einlage im Zahn („Walking-Bleach“-Technik)
- 35% H₂O₂

Medizinische Zahnaufhellung mit individuellen Schienen – Opalescence Quick



Vor der Behandlung: Zähne mit Dentinogenesis imperfecta, grau verfärbt.



Nach vier Behandlungen mit Opalescence Quick.



Schiene mit Opalescence Quick befüllen. Anwendungen erfolgen in der Zahnarztpraxis.



Opalescence Quick

- Tragszeit: 30 Minuten
- Individuelle Schiene, im Wartezimmer
- 45% Carbamidperoxid ± 15% H₂O₂

ULTRADENT
PRODUCTS USA